

ヘルスケアジュエリーについて

アンブローズでは、永久磁石の磁力を利用して人体に磁力線を浸透させることにより、装着部位のこり及び血行の改善を促す家庭用永久磁石磁気治療器「キクオール TS 型」の取り扱いを開始いたしました。

キクオール TS 型

製造販売業者名：有限会社林製作所

認証番号：22 3 AGBZX00184000

家庭用永久磁石磁気治療器（JMDN コード 71016000）

【ご使用方法】

ネックレス以外の用途での使用はせず、首に直接着用してください。

【使用上のご注意】

- 次のような医用電気機器との併用は、影響を与える可能性があるため着用しないようお願いいたします。
 - ペースメーカーなどの電磁障害の影響を受けやすい体内植込み型医用電気機器を使用している方
 - 脳脊髄液短絡術用圧可変式シャントなどの磁気影響を受ける可能性がある医用電気機器を使用している方
- 次のような場合は必ず医師とご相談の上、ご着用ください。
 - 悪性腫瘍のある方
 - 心臓に障害のある方
 - 妊娠初期の不安定期または出産直後の方
 - 糖尿病などによる高度な末梢循環障害による知覚障害のある方
 - 皮膚に感染症または創傷のある方
 - 安静を必要とする方
 - 体温38℃以上（有熱期）の方
急性炎症症状（倦怠感、悪寒、血圧変動など）の強い時期や衰弱している時
 - ねんざ（捻挫）、肉離れなどの急性〔疼痛性〕疾患の方
- 使用する前には以下のことにご注意ください。
 - 錆びることにより破損・破裂する恐れがあるため、入浴やプール等の水を浴びる際は着用しない
 - 時計、磁気カードなどの磁気の影響を受けるものには近づけない
 - 製品に破れなどが無いかを点検、磁石の装着部に破れなどがある場合は着用しない
 - 他の治療器と同時に着用しない
 - しばらく使用しなかったときには、表面に金属などの異物が吸引付着していないことを確認する
- 以下の場合はご使用を中止してください。
 - 機器に故障が発見された時
 - 身体に異常を感じた時
 - 装着部に発疹、発赤、かゆみなどの症状が現れた時

※磁気共鳴画像診断装置（MRI）の検査を受ける際は、取り外してください。

5. 保管方法について

- 強力な磁石または強磁性材の近くは避ける
- 乳幼児が製品を噛み砕き、飲み込まないように、乳幼児の手の届かない所で保管する